

器具器械56採血又は輸血用器具のうち、真空採血管

真空採血管

滅菌済みバキュティナ®プラスチック採血管


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 本品を使用して採取した血液を人体に戻さないこと（採取した血液の安全性が確保できないため）

【性状・構造等】

- 本品はプラスチック製で、採血管内部に採血量分の陰圧がかけられた真空採血管である。
- 採血管内は滅菌されている。
- キャップの形状はゴム栓タイプ（コンベンショナル）と、ヘモガード®タイプ（ゴム栓とプラスチックカバーが一体化になったキャップ）がある。

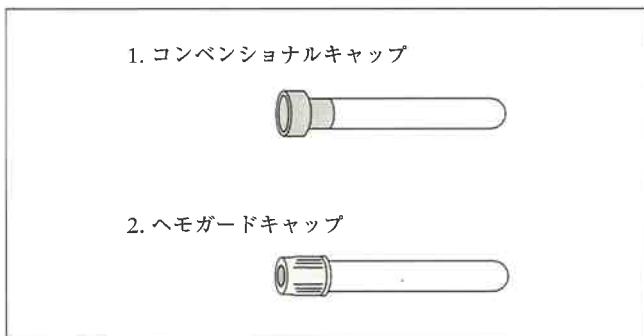

※但し、特注品においては例外あり。

※採血管のサイズ・採血量は外箱のラベルを参照のこと。

※【性能・使用目的・効能又は効果】

本品は血液検査のために数本に分けて採血する小試験管である。


※【使用方法等】

1. 採血針をホルダーにセットする。
 2. 穿刺部位を消毒し、駆血帯を取り付ける。
 3. 穿刺し、採血管をホルダーにまっすぐ完全に押し込む。
 4. 血流が始まったら、直ちに駆血帯を外す。
 5. 連続採血する場合は、ホルダーを固定したまま採血管を取り替える。
 6. 採血終了後、抜針する。
- 本品を使用し採血する際には、バキュティナ®ブランドの採血針および専用ホルダーの使用を推奨する。

※【使用上の注意】

1. 採血管を取り扱う際は、血液との接触を最小限にするため手袋をするなどの適切な標準予防策を取ること。

2. 採血後、直ちにゆっくりと転倒混和し、血液と添加剤を十分に混和させること。
3. 使用後の採血管は適切な廃棄容器に捨てること。
4. 血清採取用の採血管を使用する場合は採取した血液を十分に凝固させた後、血清を採取すること。
5. 採取した血液が飛散することがあるため、栓を親指で押し上げて外さないこと。栓は回しながら引き抜くこと。

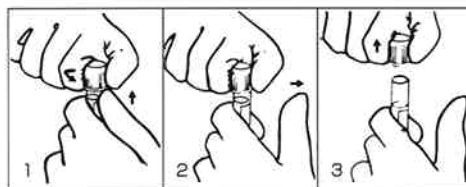

6. 異物の混入が認められる採血管は使用しないこと。
7. 針刺し事故等によって血液検体に触れてしまった場合は、直ちに流水でよく洗い、適切な医療処置を受けること。
8. 血清/血漿分離剤入り採血管は血清/血漿保存後再度遠心分離しないこと。検査値に影響を及ぼす恐れがある。
9. 有効期限の切れた採血管は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期限等】

貯蔵・保管方法

直射日光を避け、4～25℃で保管すること。

使用期限

使用期限は採血管に印字または採血管貼付ラベルに表示。

【包装】

100本/ケース

1000本/ケース

※【製造業者又は輸入販売業者の名称及び住所】



Indispensable to
human health

製造業者又は輸入販売業者：

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂8丁目5番26号
TEL：0120-8555-90 (BDお客様情報センター)
輸入品の場合
輸入先企業名：Becton, Dickinson and Company
輸入先国名：アメリカ合衆国、イギリス